

グラフトデリバリーキット (GDP-10)

クイックステップガイド

詳しい使用方法については、グラフトデリバリーキットに含まれる添付文書を参照してください。注：すべての手順において無菌操作を行い、患者さまの安全および調製物の品質を確保してください。



← アッセンブルシリンジ


1

移植材料をアッセンブルシリンジの中に詰めます。



2


1 mL シリンジに活性化溶液を充填します。

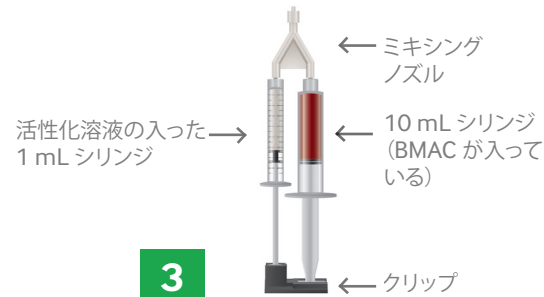

← ミキシングノズル
← 10 mL シリンジ (BMAC が入っている)
← 活性化溶液の入った 1 mL シリンジ

3

活性化溶液の入ったシリンジと 10 mL シリンジをミキシングノズルに装着します。クリップを取り付けます。

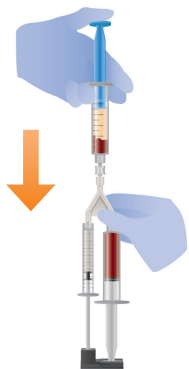


5

クリップをテーブルの上に置き、片手はミキシングノズルに添えて支えます。BMAC と活性化溶液がアッセンブルシリンジに満たされて、移植材料が完全に満たされるまで、途中で止めることなく押し下げます。



6


メス - メスロックコネクタからアッセンブルシリンジを取り外します。アッセンブルシリンジを 1 ~ 2 分間そのまま放置してください。

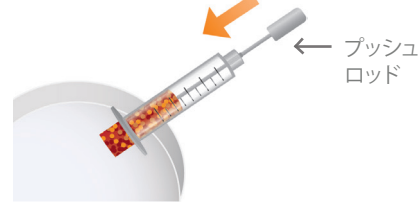

← プッシュロッド

7

シリンジから移植材料を取り出します。青いプランジャーを引き抜いてください。プッシュロッドを押し下げて、アッセンブルシリンジの内容物をペトリ皿に排出します。

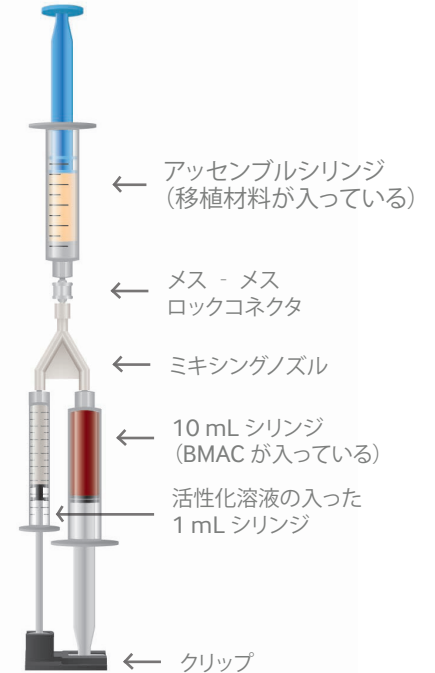

← アッセンブルシリンジ (移植材料が入っている)
← メス - メスロックコネクタ
← ミキシングノズル
← 10 mL シリンジ (BMAC が入っている)
← 活性化溶液の入った 1 mL シリンジ
← クリップ

4

メス - メスロックコネクタとアッセンブルシリンジをミキシングノズルに取り付けます。